

# Etykiety do kontenera

dokumentacja obiegu narzędzi

## opis produktu

Samoklejąca etykieta jest wykonana z kartonu najwyższej jakości, o danych właściwościach fizycznych i chemicznych (porowatość, pH, skład). Nietoksyczny tusz spełnia standardy nakładane przez normę ISO11140-1 dla wskaźników procesu Typ 1.

Wymiary całkowite etykiety: 67 x 38 mm, wskaźnik: 0,5 cm<sup>2</sup>. Każda etykieta oprócz wskaźnika, zawiera puste miejsca na umieszczenie następujących danych: nr sterylizatora, data ważności, data procesu i osoba odpowiedzialna.

## sposób użycia i odczyt wyników


Jeśli etykieta ze wskaźnikiem została poddana procesowi sterylizacji parowej (w temp. 121°C - 134°C), po procesie wskaźnik chemiczny zmienia kolor z początkowego żółtego na ciemno-brązowy/ czarny.

## zastosowanie

Służy do umieszczenia w kieszonce na przedzie kontenera po uprzednim naniesieniu danych na temat procesu sterylizacji. Gdy wskaźnik w kształcie kropki zmieni kolor z żółtego na ciemno-brązowy/ czarny, wskazuje na to, że sterylizacja się odbyła.



przed procesem

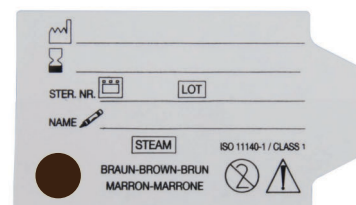

po procesie



## normy

ISO 11607-1  
EN 868-2; EN 868-8

## przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, w temperaturze 10-40°C. Okres przydatności: na opakowaniu.

## numer katalogowy i opakowanie

**ETYKIETA- 550A:**  
500 sztuk w opakowaniu