

Etykiety do kontenera

dokumentacja obiegu narzędzi

opis produktu

Etykieta-plomba jest wykonana z kartonu najwyższej jakości, samoklejąca o danych właściwościach fizycznych i chemicznych (porowatość, pH, skład). Nietoksyczny tusz spełnia standardy nakładane przez normę ISO11140-1 dla wskaźników procesu Typ 1.


Wymiary całkowite etykiety: 80 x 35 mm, wskaźnik: 0,5 cm². Każda etykieta oprócz wskaźnika, zawiera puste miejsca na umieszczenie następujących danych: nr sterylizatora, data ważności, data sterylizacji i osoba odpowiedzialna.

sposób użycia i odczyt wyników


Jeśli etykieta ze wskaźnikiem została poddana procesowi sterylizacji parowej (w temperaturze 121°C - 134°C), po procesie wskaźnik chemiczny zmienia kolor z początkowego żółtego na brązowy.

zastosowanie

Sterylizatory parowe różnego typu. Aby zabezpieczyć zamknięcie kontenera przed nieautoryzowanym otwarciem i umożliwić naniesienie danych o sterylizacji. Zmiana koloru wskaźnika z żółtego na brązowy potwierdza, że sterylizacja się odbyła. Do kontenerów Aesculap.

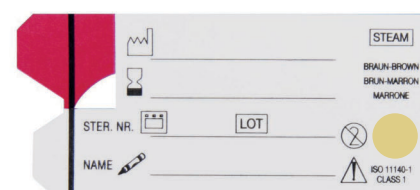

przed procesem

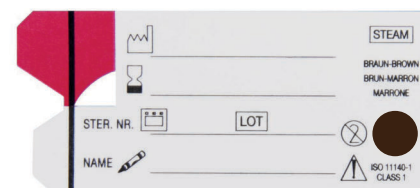

po procesie

normy

ISO 11607-1
EN 868-2; EN 868-8

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, w temperaturze 10-40°C. Okres przydatności: na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

ETYKIETA- 552A:
500 sztuk w opakowaniu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu