



## Środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu i środek sterylizujący Isaspor™

W ramach kompleksowego rozwiązania dla reprocesowania endoskopów, Cantel Medical oferuje różne rozwiązania, które zostały opracowane specjalnie do użytku z myjnią-dezynfektorem endoskopów MEDIVATORS® ISA™ w celu spełnienia wszystkich potrzeb użytkowników.

Środek chemiczny zimnej sterylizacji/środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu, jedнокrotnego użycia ISASPOR oraz detergent ISACLEAN zostały opracowane by zagwarantować bezpieczny i niezawodny przebieg procesu wraz z wysoką kompatybilnością ze wszystkimi markami endoskopów.

### PRZEZNACZENIE

Zaprojektowany z przeznaczeniem do użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATORS® ISA™. Niski wyjściowy poziom PAA (kwasu nadoctowego) oraz pH 6 gwarantują wysoką kompatybilność z przyrządami i urządzeniami medycznymi. Środek jedнокrotnego użycia.

### EFEKTYWNOŚĆ

Synergiczne działanie aktywatora ISAZONE® i kwasu nadoctowego (PAA). Sterylizacja zgodnie z EN ISO 14937 osiągnięta w temperaturze pokojowej. Czas kontaktu środka dezynfekcyjnego: 3 minuty.

### SKŁAD

Składnik A: nadtlenek wodoru, kwas octowy; Składnik B: Propan-2-ol, boraks, dziesięciowodny, wodorotlenek sodu, 1,2,3-benzotriazol. Aktywator ISAZONE®, kwas nadoctowy. Wolny od aldehydów.



- **Bezpieczeństwo** – przetestowany klinicznie, mikrobiologicznie i toksykologicznie.

numer katalogowy	opis	opakowanie
500187	ISASPOR środek dezynfekcyjny jedнокrotnego użycia	10 l roztworu A+B
500188	ISASPOR środek dezynfekcyjny jedнокrotnego użycia	5 l roztworu A+B

### Dystrybutor w Polsce: