

SporView®

Test biologiczny BI

ampułkowy test VH_2O_2 plazma

opis produktu

Wskaźnik biologiczny VH_2O_2 zawiera określoną ilość 7953 (1) *Geobacillus stearothermophilus* 10^6 spor bakterii zaszczerpionych na krążku plastikowym i umieszczonych wewnątrz termoplastycznej tubki, w której znajduje się także szklana kruszalna ampulka wypełniona pożywką kulturową koloru fioletowego. Na zewnątrz testu umieszczono łatwo odklejalną etykietę, na której znajduje się wskaźnik Typ 1, który, gdy zostanie wystawiony na czynnik sterylizujący, zmienia swoje zabarwienie z różowego na niebieski.

Test nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych. W każdym opakowaniu znajduje się certyfikat zawierający m.in.: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii oraz D-value.

sposób użycia i odczyt wyników

Test BI należy umieścić w opakowaniu typu TYVEK lub SMS, a następnie włożyć go do sterylizatora, pomiędzy sterylizowane pakiety. Poddać załadunek cyklowi sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Po przeprowadzonym procesie sterylizacji należy aktywować pożywkę BI poprzez rozkruszenie ampulki, a następnie poddać test inkubacji w temp. 55-60°C przez 24 godziny.

Jeżeli proces sterylizacji przebiegł prawidłowo, nie powinna nastąpić zmiana koloru pożywki. W przypadku gdy spory przeżyją, nastąpi zmiana koloru pożywki na żółty, co oznacza, że proces przeszedł nieprawidłowo.

obszary zastosowań

Sterylizatory plazmowe VH_2O_2 różnych typów, m.in.: Sterrad, Plasmad, Steris. BI może być inkubowany we wszystkich dostępnych inkubatorach, m.in. 3M, Browne, J&J, SPS medical.

wytwórca

SPS medical / CROSSTEX® USA



normy

ISO 11138-1
EN-867-3
ANSI/AMII ST46: 2002

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 15 miesięcy od daty produkcji.

numer katalogowy i opakowanie

Ampułkowy test VH_2O_2 BI: VH50
50 szt. w opakowaniu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu