

Etykiety do kontenera

dokumentacja obiegu narzędzi

opis produktu

Samoklejąca etykieta jest wykonana z kartonu najwyższej jakości, o danych właściwościach fizycznych i chemicznych (porowatość, pH, skład). Nietoksyczny tusz spełnia standardy nakładane przez normę ISO11140-1 dla wskaźników procesu Typ 1.


Wymiary całkowite etykiety: 67 x 38 mm, wskaźnik: 0,5 cm². Każda etykieta oprócz wskaźnika, zawiera puste miejsca na umieszczenie następujących danych: nr sterylizatora, data ważności, data procesu i osoba odpowiedzialna.

sposób użycia i odczyt wyników


Jeśli etykieta ze wskaźnikiem została poddana procesowi sterylizacji parowej (w temperaturze 121°C - 134°C), po procesie wskaźnik chemiczny zmienia kolor z początkowego żółtego na ciemno-brązowy/czarny.

zastosowanie

Sterylizatory parowe różnego typu. Służy do umieszczenia w kieszonce na przedzie kontenera po uprzednim naniesieniu danych na temat procesu sterylizacji. Gdy wskaźnik w kształcie kropki zmieni kolor, wskazuje na to, że sterylizacja się odbyła.

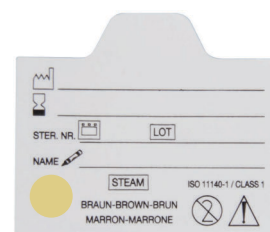

przed procesem

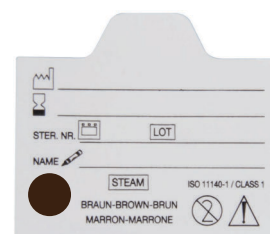

po procesie



normy

ISO 11607-1
EN 868-2; EN 868-8

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, w temperaturze 10-40°C. Okres przydatności: na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

ETYKIETA- 550W:
500 sztuk w opakowaniu