

## INKUBATOR BI

cieplarka do testów biologicznych

### opis produktu

Uniwersalna cieplarka do inkubowania wszystkich rodzajów szczepów bakterii wykorzystywanych w metodach sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem, plazmą oraz suchym gorącym powietrzem. Urządzenie kompatybilne z ampulkowymi testami biologicznymi różnych producentów. Inkubator wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, który wskazuje aktualne parametry temperatury i czasu. Membranowe przyciski sterujące pozwalają na określenie czasu i temperatury pracy w zakresie od 5°C do 80°C. Cieplarka na bieżąco monitoruje i wyświetla aktualną temperaturę inkubacji. Blok aluminiowy zawiera okrągłe otwory, w które należy umieścić ampulki z testami biologicznymi oraz przezroczystą pokrywę umożliwiającą wizualną kontrolę procesu. Obudowa wykonana jest z odpornego na środki chemiczne tworzywa, a membranowe przyciski zapewniają higieniczne użytkowanie.

### sposób użycia

Podłączyć do źródła prądu, ustawić parametry czasu i temperatury inkubacji zgodnie z zaleceniami producenta testów. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury umieścić uprzednio skruszone ampulki z testami biologicznymi w otworach inkubacyjnych. Urządzenie poinformuje o zakończonym procesie inkubacji, dając sygnał dźwiękowy i wizualny. Następnie należy odczytać wynik testu. Zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi zamieszoną w opakowaniu.

### dane techniczne

Wymiary urządzenia: 110 mm x 150 mm x 80 mm

Waga: 0,5 kg

Zasilanie (napięcie): DC12V/ 100-240V

Maksymalna moc: 35W

Średnia moc: 5W

Zakres temperatur: od 5°C do 80°C

Zakres czasu: od 0 do 99 h 59 min

Dokładność temperatury:  $\leq \pm 0,5^\circ\text{C}$

Dokładność wyświetlacza: 0,1°C

Osiągnięcie czasu nagrzewania (od 20°C do 80°C):  $\leq 12$  min

Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C



STEAM FORM VH2O2

EO DRY

### normy

IEC62321:2008,  
LV Directive 2006/95/EC,  
EN61010-1:2001

### przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu,  
w temperaturze 5°C-35°C, z dala  
od źródeł światła słonecznego.

### numer katalogowy

INCBI - 1 szt.

Rozwiązania dla sterylizacji i dezynfekcji



### INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)