

Belimed Protect™ Pre Treat Spray

spray do wstępnego oczyszczania

opis produktu

Spray do wstępnego oczyszczania Belimed Protect™ został stworzony z myślą o transporcie i tymczasowym przechowywaniu zabrudzonych narzędzi chirurgicznych oraz urządzeń medycznych wielokrotnego użytku przed reprocessowaniem. Spray ma postać piany, a z biegiem czasu przechodzi innowacyjną i zaawansowaną technologicznie transformację, na skutek której na powierzchni urządzeń medycznych wielokrotnego użytku pozostaje płynny żel. Ta gęsta warstwa zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń biologicznych i inicjuje proces czyszczenia, rozkładając krew szybciej niż wodące produkty konkurencji.

- Gęsta piana/płynny żel - pokrycie równą warstwą zapobiega wysychaniu narzędzi i inicjuje rozkład zanieczyszczeń
- Skoncentrowana forma piany/żelu ogranicza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego poprzez kapsułkowanie zanieczyszczeń, w przeciwieństwie do innych wodnych sprayów do wstępnego oczyszczania
- Przemiana w żel zatrzymuje wilgoć, co ułatwia splukiwanie
- Kompatybilny z wieloma materiałami - chroni powierzchnię narzędzi

zastosowanie

Obficie aplikować w miejscu użycia (przed transportem). Przed automatycznym reprocessowaniem dokładnie ręcznie opłukać lub pominąć ręczne opłukiwanie i zastosować dwuetapowe płukanie w procesie WD. Instrukcji czyszczenia należy szukać w instrukcji użytkowania od producenta urządzenia.

opakowania

750ml



Spray do wstępnego oczyszczania Belimed Protect™

Rozcieńczenie temp. robocza czas narażenia	Według potrzeb, 0-24 godzin, gotowy do użycia w temperaturze pokojowej
Znak CE	Produkt jest zgodny z wymaganiami Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
Kolor	Od żółtego do brązowego
Wartość pH gotowego roztworu	pH około 8-10
Warunki przechowywania	5-25°C
Okres przechowywania	24 miesiące
Zalecenia dotyczące utylizacji	Patrz karta charakterystyki produktu

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu