

Wrap tape

Taśmy sterylizacyjne samoprzylepne taśmy zabezpieczające

opis produktu

Taśmy zabezpieczające w wersji bez wskaźnika oraz ze wskaźnikiem procesu przeznaczone są do zabezpieczania opakowań, które są poddawane sterylizacji parą. Taśmy zachowują doskonale parametry fizyczne i nie odklejają się podczas procesu; można je łatwo odkleić od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego uszkodzenia.

Produkt wykonany jest ze specjalnego, supermocnego papieru krepowanego, pokryty warstwą syntetycznego kleju.

Dzięki wskaźnikowi chemicznemu typu 1 (zgodnie z ISO 11140) możliwe jest rozróżnienie pakietów wysterylizowanych od tych nie poddanych procesowi sterylizacji.

sposób użycia i odczyt wyników

Pakiet zawinięty papierem krepowanym, włókniną lub SMSem należy okleić taśmą na całej jego długości i szerokości, w taki sposób, aby końcówki taśmy zachodziły na siebie na odcinku minimum 10cm.

W przypadku taśm ze wskaźnikiem- wskaźnik przebarwia się z zielonego na czarny po poddaniu pakietu procesowi sterylizacji parowej w odpowiednich warunkach: w urządzeniach pracujących w temp. 121°C przez 30 minut, w temp. 132°C przez 4 minuty lub w 135°C przez 3 minuty.

dane techniczne


kolor:	beżowy, niebieski, z nadrukowanymi zielonymi liniami wskaźnika*
podłoże:	nasycony papier krepowany
klej:	syntetyczny elastomer
wskaźnik:	tusz bez ołowiu*
grubość:	0,15mm
pryczepność do stali:	8.2N / 25mm
Wytrzymałość:	87N / 25mm
Wydłużenie:	7%

* informacje dotyczą taśm ze wskaźnikiem

informacje dodatkowe

normy: ISO 11140-1:2005, typ 1

przechowywanie i okres przydatności: należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów; okres przydatności 3 lata od daty produkcji

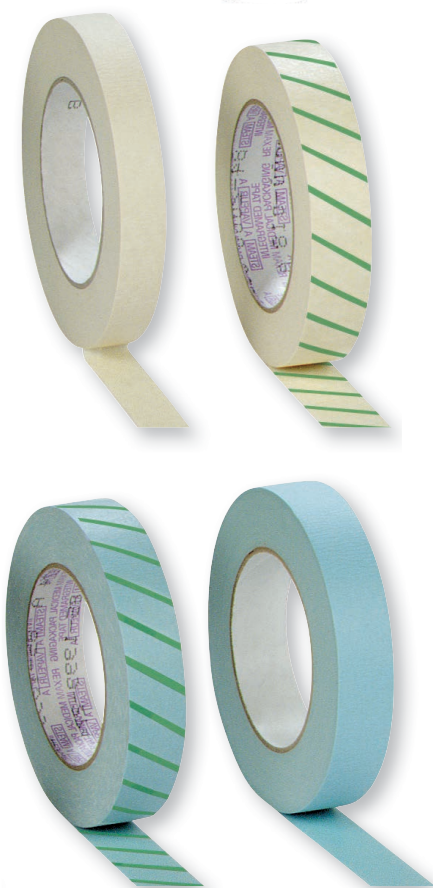

przed procesem

w trakcie procesu

po procesie

Wrap tape

Taśmy sterylizacyjne

samoprzylepne taśmy zabezpieczające



opis produktu






BEŻOWE TAŚMY (naturalne), do papieru krepowanego

- wersja neutralna (bez wskaźnika):
sterylizacja parowa
szerokości taśm: 18mm | 24mm | 48mm, długość rolki 50m
- wersja ze wskaźnikiem procesu:
wskaźnik w kolorze zielonym
szerokości taśm: 18mm | 24mm, długość rolki 50m

NIEBIESKIE TAŚMY- do włókniny, SMS

dla uzyskania maksymalnej przyczepności, specjalnie przystosowane do włókniny i SMS

- wersja neutralna (bez wskaźnika):
szerokości taśm: 24mm | 48mm, długość rolki 50m
- wersja ze wskaźnikiem procesu:
wskaźnik w kolorze zielonym
szerokości taśm: 18mm | 24mm | 48mm, długość rolki 50m

nr katalogowy	szerokość taśmy	ilość
beżowa taśma do papieru krepowanego, neutralna (bez wskaźnika):		
 30001950	18mm	48 szt. w opakowaniu
30002450	24mm	36 szt. w opakowaniu
30004850	48mm	28 szt. w opakowaniu
beżowa taśma do papieru krepowanego, ze wskaźnikiem:		
 31001950VE	18mm	48 szt. w opakowaniu
31002550VE	24mm	36 szt. w opakowaniu
niebieska taśma do włókniny, neutralna (bez wskaźnika):		
 30BLEU2550	24mm	36 szt. w opakowaniu
30BLEU4850	48mm	18 szt. w opakowaniu
niebieska taśma do włókniny, ze wskaźnikiem:		
 31BL1950VE	18mm	48 szt. w opakowaniu
31BL2550VE	24mm	36 szt. w opakowaniu
31BL4850VE	48mm	18 szt. w opakowaniu
 dystyributor taśmy:		
47000010		1 szt.