

# Wash-Checks™ U

testy kontroli mycia ultradźwiękowego

## opis produktu

Innowacyjne testy służą do sprawdzania skuteczności procesów mycia poprzez kawitację oraz efektywności działania detergentów w myjniach ultradźwiękowych każdego typu. Testy Wash-Checks™ U są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia zgodnie z ISO 15883.

Testy są bezpieczne dla użytkownika i nie zawierają komponentów krwi, a substancja wskaźnikowa koloru niebieskiego zaprojektowana została w taki sposób, aby maksymalnie krytycznie ocenić skuteczność działania głowic ultradźwiękowych. Efekt czyszczący w kąpeli ultradźwiękowej uzyskiwany przez kawitację powoduje wyplukanie niebieskiej substancji testowej. Wskaźnik kontrolny umieszczony jest na specjalnej, cienkiej płytce metalowej, która doskonale nadaje się do archiwizacji, a niski koszt monitorowania procesów mycia pozawala na częste używanie testów. Zaleca się używanie testów kontroli mycia cyklicznie w ciągu dnia, razem z pełnym wsadem, oraz raz w tygodniu przy pustej myjni. Test należy używać zawsze ze specjalnym uchwytem. Odczyt wyniku kontroli mycia ultradźwiękowego w czterech płaszczyznach. Wszystkie wskaźniki posiadają indywidualny numer seryjny.

## sposób użycia i odczyt wyników

Jeśli myjnia działa w sposób właściwy, to substancja wskaźnikowa zostanie usunięta podczas procesu mycia. Pozostałość niebieskiego zabrudzenia na teście może oznaczać, iż myjnia ultradźwiękowa działa niewłaściwie.

## obszary zastosowań

Myjnie ultradźwiękowe wszystkich typów.



Przed myciem



Po nieefektywnym myciu



Po efektywnym myciu



Uchwyt

## normy

ISO 9001:2008,  
ISO 13485:2003,  
ISO 15 883

## przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres przydatności:  
2 lata od daty produkcji.

## numer katalogowy i opakowanie

**Test - WC108:**  
50 szt. w opakowaniu  
**Uchwyt H - WC102:**  
1 szt.