

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla sterylizowanych materiałów medycznych

opis produktu

System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5.

Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA® wraz z nową, odklejalną folią tworzą cztery razy bardziej odporne na perforację, bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych. Polyolefin i folia połączone są 3-kanalowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m², zastosowany w opakowaniach ULTRA® zamiast papieru, gwarantują wyjątkową łatwość otwierania przez odklejanie, całkowicie eliminując ryzyko pylenia. Opakowania można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Dodatkowo ich wysoka porowatość pozwala na dobrą penetrację środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia.

Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ 1. Kontrolę skuteczności procesu sterylizacji innymi metodami zaleca się wykonywać poprzez umieszczenie wskaźnika chemicznego wewnątrz opakowania.

Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 130-150°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia.


Nowe opakowania ULTRA® posiadają certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną przez okres min. 12 m-cy.

przeznaczenie opakowań ULTRA®

- tace narzędziowe
- kosze na implanty
- narzędzia okulistyczne
- duże i ciężkie zestawy
- narzędzia delikatne i złożone

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowe (plazma, tlenek etylenu, formaldehyd) różnych rozmiarów i typów spełniających odpowiednie normy.

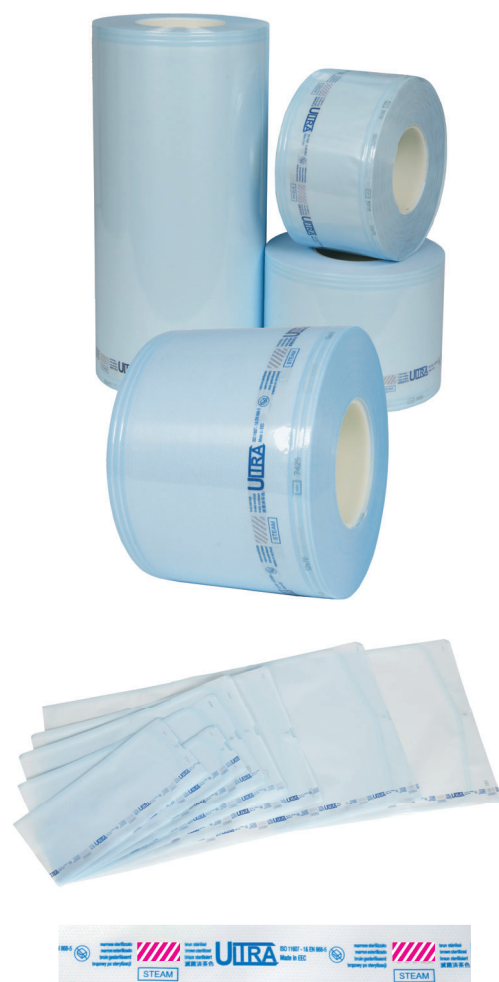

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11607-1 PN EN 868 -5 ISO 9001 Dyrektywa CE 93/42 Klasa 1 wyrób medyczny niesterylny, CE	Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, w temperaturze 10-40°C. Okres przydatności: na opakowaniu.	Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Numer serii umieszczony na rękawie.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla sterylizowanych materiałów medycznych

■ rękawy ULTRA®

99ULT09070	90mm x 70 m	3 rolki w kartonie
99ULT12070	120mm x 70 m	2 rolki w kartonie
99ULT16070	160mm x 70 m	2 rolki w kartonie
99ULT21070	210mm x 70 m	2 rolki w kartonie
99ULT27070	270mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT32070	320mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT38070	380mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT42070	420mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT47070	470mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT52070	520mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT58070	580mm x 70 m	1 rolka w kartonie

■ torebki ULTRA®

98ULT01634	160 x 340 mm	1000 sztuk w opakowaniu
98ULT02242	225 x 420 mm	500 sztuk w opakowaniu
98ULT02845	285 x 450 mm	500 sztuk w opakowaniu
98ULT03250	320 x 500 mm	500 sztuk w opakowaniu



Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w myśl prawa handlowego.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu