

Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner

Łagodny alkaliczny środek myjący, cechujący się doskonałą kompatybilnością materiałową



Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner należy stosować do usuwania obciążeń biologicznych znajdujących się na narzędziach chirurgicznych oraz innych urządzeniach wielokrotnego użytku, w tym również mocnych zabrudzeń. Odpowiedni do użytku z aluminium i aluminium anodowanym. Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner nie powoduje korozji i jest łatwy do spłukania, nie wymaga neutralizacji.

- Skuteczny i łagodny alkaliczny środek myjący
- Doskonała kompatybilność materiałowa – wolny od EDTA i NTA
- Niskopieniący się – łatwy do spłukania
- Brak konieczności neutralizacji

Informacje dotyczące zamówienia

5 L/10 L/25 L/200 L

Opis produktu	Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner
Rozcieńczenie/Temperatura robocza/Czas ekspozycji	2-10 mL/L, 35-80°C, 5-10 min
Znak CE	Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG, a jednocześnie spełnia wymagania Rozporządzenia Europejskiego (UE) 2017/745, Załącznik 1
Kolor	Przezroczysty/bezbarwny, przechodzi w jasnobrązowy
Wartość pH roztworu gotowego do zastosowania	pH 10-10,5 (woda demineralizowana)
Warunki przechowywania	min. 5°C
Okres przechowywania	36 miesięcy
Zalecenia dotyczące utylizacji	Patrz karta charakterystyki produktu

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu

Informacje ogólne o właściwościach produktu

Niniejsza tabela ma charakter wyłącznie informacyjny.

	Przeznaczenie (produktu)							Spektrum mikrobójcze							Wartość pH <small>(rozwiązanie gotowe do zastosowania)</small>		
	Mycie narzędzi	Dezynfekcja narzędzi	Konserwacja/pielęgnacja narzędzi	Maszynowe mycie basenów	Do szkła	Do narzędzi termolabilnych	Do endoskopów giętkich	Bakterie (wszystkie bakterie roślinne, w tym bakterie wielopoporne, np. MRSA, VRE, ESBL)	Drożdżakobójcze (drożdże)	Grzybobójcze (grzyby)	Prątkobójcze (np. bakterie grzyźlicy)	Wirusobójcze w przypadku wirusów z otoczką (w tym HBV, HCV, HIV)*	W pełni wirusobójcze (wirusy z otoczką i bez np. wirus brodawczaka ludzkiego, parwovirus)	Łagodnie alkaliczny	Obojętny	Kwasowy	
Belimed Protect™ Pre Treat Spray	•		•										•				
Belimed Protect™ Neutral Enzyme Cleaner	•					•	•							•			
Belimed Protect™ Mild Alkaline Enzyme Cleaner	•					•	•						•				
Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner	•			•	•	•							•				
Belimed Protect™ Rinse and Dry Aid					•									•			
Belimed Protect™ Scale and Rust Remover			•												•		
Belimed Protect™ Neutralizer					•										•		
Belimed Protect™ Lubricant WD			•											•			
Belimed Protect™ Glutaraldehyde Disinfectant		•				•	•	•	•	•	•	•		•			
Belimed Protect™ PAA 15		•				•	•	•	•	•	•	•		•			
Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant							•	•		•	•			•			
Belimed Protect™ Bedpan Cleaner				•											•		

*Zgodnie z zaleceniami RKI, Bundesgesundheitsblatt [Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia] 01-2004

Instrukcja użytkowania

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących reprocessowania urządzeń medycznych według normy EN ISO 17664.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących reprocessowania narzędzi, należy przejść na stronę www.a-k-i.org.

Safety Information

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego postępowania z produktem należy odwołać się do karty charakterystyki produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Grupa środków chemicznych Belimed Protect™ została opracowana i zatwierdzona z myjniemi-dezynfektorami oraz myjniemi endoskopowymi Belimed, tak, by spełniała wymagania dotyczące skuteczności mycia wyrobów medycznych według stałych i powtarzalnych standardów określonych w normie EN ISO 15883. W celu uzyskania dalszego wsparcia odnośnie optymalizacji procesu mycia i/lub wykrywania oraz usuwania usterek należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Belimed.

Symbole Belimed Protect™ - Zalecane użycie



Do reprocessowania automatycznego w WD/AER



Do reprocessowania ręcznego



Bezpieczny do stosowania z endoskopami giętkimi

System kodowania kolorów Belimed Protect™ - kategoria produktów



Do mycia



Do dezynfekowania



Do neutralizacji



Do płukania i suszenia



Do konserwacji i pielęgnacji

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu