

Medivators

SCOPE BUDDY

urządzenie do przepłukiwania kanałów endoskopów

opis produktu

Scope Buddy to łatwe w obsłudze urządzenie do przepłukiwania wszystkich kanałów endoskopu, eliminujące przepłukiwanie za pomocą strzykawek oraz wyciorów. Kanały przepłukiwane są za pomocą wody wraz z detergentem w krótkim czasie, dzięki czemu eliminuje się ryzyko powtarzania tych samych ruchów co ma miejsce w przypadku ręcznego mycia. Urządzenie montowane jest na ścianie, nad zlewem, lub umieszczane na blacie.

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia, raz dziennie wykonywany jest test QA, który weryfikuje prawidłowe działanie urządzenia (weryfikacja polega na przetoczeniu 100 ml wody z detergentem do cylindra laboratoryjnego w ciągu 10 sekund)

Sterowanie urządzenia odbywa się przy pomocy panelu sterowania składającego się z 3 przycisków oraz wyświetlacza, na którym wyświetlany jest czas procesu. Skuteczny proces przepłukiwania jest możliwy już w 30 sekund. Zakończenie procesu mycia komunikowane jest za pomocą sygnału dźwiękowego i wizualnego. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi endoskopami

Dla lepszych efektów mycia w Scope Buddy rekomendowany jest środek chemiczny INTERCEPT .



kod katalogowy		wymiary	producent
Scope buddy	EFA-IN-G	(szer. x gł. x wys.): 15,2 x 20,3 x 24,1 cm	Medivators, USA
Zestaw adapterów	78399-669		
Intercept	ML02-0106		

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu