

# MEDIVATORS®

## ADVANTAGE PLUS® Model Przelotowy

System reprocesowania endoskopów



MODEL PRZELOTOWY

SZYBKI I WYDAJNY OBIEG

BEZDOTYKOWE ZAMYKANIE/  
OTWIERANIE DRZWI


ZAPROJEKTOWANY  
NA SPRAWDZONEJ  
TECHNOLOGII  
ADVANTAGE PLUS

# SZYBKI I ELASTYCZNY SYSTEM – PRZYSZŁOŚĆ REPROCESOWANIA ENDOSKOPÓW

Medivators oferuje jedyny w swoim rodzaju system reprocresowania, który w pełni uwzględnia najwyższe standardy w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń wraz z ochroną i zabezpieczeniem obsługi endoskopów giętkich.

Myjnia-dezynfektor ADVANTAGE PLUS® Model Przelotowy skonstruowany na sprawdzonym systemie ADVANTAGE PLUS odpowiada najwyższym wymaganiom pracowni endoskopowych na całym świecie. Dzięki przelotowości i wbudowanej inteligentnej technologii umożliwiającej szybkie i asynchroniczne reprocresowanie wykorzystujące obsługę bezdotykową i ograniczony zakres czynności związanych z endoskopami, pozwala on na reprocresowanie 4-5 endoskopów w ciągu około godziny.

**Unikatowa konstrukcja modułowa umożliwi szybki i sprawny przebieg reprocresowania i sprawia, że myjnia-dezynfektor MEDIVATORS® ADVANTAGE PLUS Model Przelotowy jest rozwiązaniem wybieranym przez duże placówki o możliwym potencjale wzrostu liczby procedur w przyszłości.**

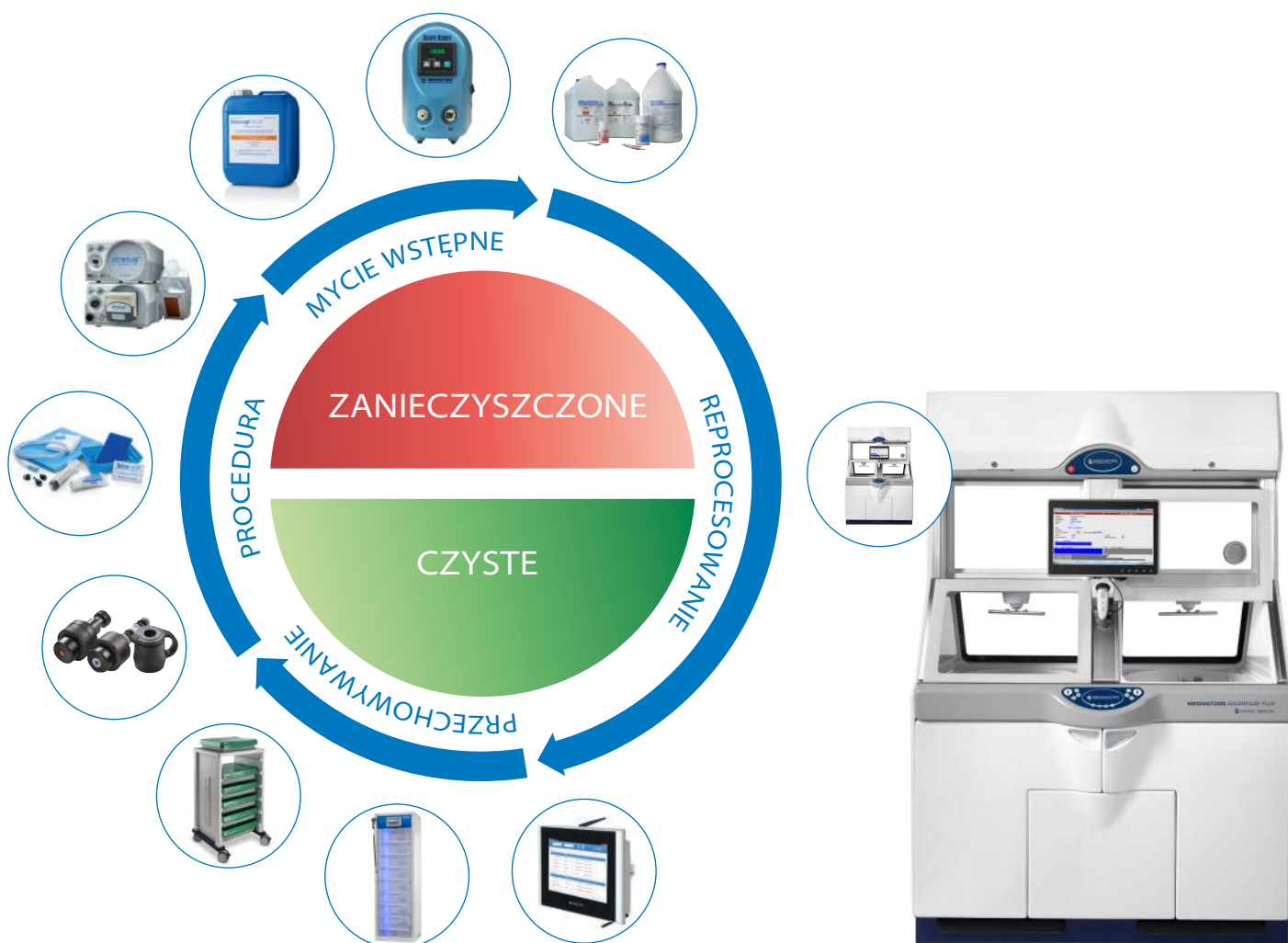

# MYJNIA-DEZYNFEKTOR ADVANTAGE PLUS® Model Przelotowy – STWORZONA BY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA

## PRZELOTOWA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA OBSŁUGĘ BEZ UŻYCIA RĄK

- Zaprojektowana na bardzo popularnej myjni-dezynfektorze ADVANTAGE PLUS
- 100% dostęp serwisowy od strony brudnej
- Zapewnia łatwość korzystania i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia



## DUŻE NIEZALEŻNE KOMORY Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁATWEGO ZAŁADUNKU

- Działanie asynchroniczne
- Dostosowane do wszystkich rodzajów endoskopów giętkich



## REPROCESOWANIE SZEROKIEGO ZAKRESU ENDOSKOPÓW

- Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami endoskopów giętkich
- Możliwość reprocessowania niezanurzalnych elektronicznych elementów endoskopów

## MONITOROWANIE KANAŁÓW ENDOSKOPOWYCH

- Gwarantuje właściwe podłączenie do adaptera
- Monitoruje kanały endoskopowe pod kątem zatorów
- Zapewnia prawidłowe i całkowite reprocessowanie wszystkich kanałów



## WYSOKOWYDAJNY CYKL MYCIA


- Funkcja podwójnego mycia zapewnia równomierne i dokładne usuwanie zabrudzeń i pozostałości

## ROZLEGŁE ZARZĄDZANIE DANYMI Z PROCESÓW

- Czytnik kodów do szybkiego i dokładnego wprowadzania danych
- Komputerowe programowanie procesu oraz obsługa i dokumentacja endoskopów
- Monitorowanie cyklu na ekranie w czasie rzeczywistym



## Specyfikacja produktowa MYJNI-DEZYNFEKTORA ADVANTAGE PLUS® Model Przelotowy

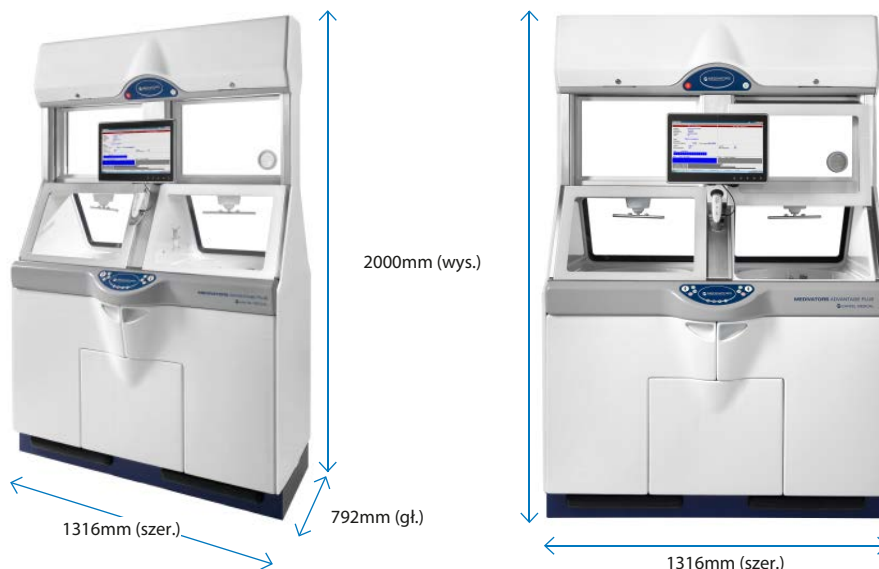

### Specyfikacja

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Model                         | ADVANTAGE PLUS Model Przelotowy   |
| Wymiary                       | 2000mm (wys.) x 1316mm (szer.) x 792mm (gł.)  |
| Czas procesowania             | ok. 23 minut  |
| Wymagania dotyczące zasilania | 230 V ± 10%, jednofazowe, 50 Hz, 1800 Wat, możliwość dostępu użytkownika  |
| Dopływ wody                   | Minimalne natężenie przepływu 5L/min przy ciśnieniu 2 do 6 bar  |
|                               | Temperatura wody 25°C   |
|                               | Twardość, poniżej 50 mg/L CaCO <sub>3</sub> / 2.8DH   |
| Odptyw                        | 40L/min poniżej 457 mm od posadzki, odpowietrzony   |
| Dopływ powietrza              | Ciśnienie w zakresie 4 - 10 bar, minimalna objętość przepływu 0,71l/sek, Dostępna opcjonalna sprężarka powietrza  |
| Wentylacja                    | Minimum 10 wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniu, dostępna opcjonalna instalacja wentylacyjna, 110 V, A minimum 12 L/s przy ciśnieniu statycznym 62 PA wymaganych jest w celu właściwej wentylacji maszyny. |
| Wydajność procesu             | Asynchroniczna, 1 endoskop na komorę  |

### Materiały eksploatacyjne

| Opis  | Numer części |
|---|--------------|
| ADVANTAGE PLUS Model Przelotowy, 230V (ze sprężarką powietrza)  | ADVPT-3005   |
| ADVANTAGE PLUS Model Przelotowy, 230V (bez sprężarki powietrza) | ADVPT-3006   |
| Kaseta transportowa   | CAS-1000     |
| RAPICIDE PA (2x5 litrów Część A & 2x5 litrów Część B)           | ML02-0115    |
| Detergent INTERCEPT Plus  | ML02-0145    |

ADVANTAGE PLUS® Pass-Thru jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medivators Inc.  
 RAPICIDE® PA jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medivators Inc.  
 INTERCEPT® Plus jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medivators Inc.



Wytwórca:  
 Medivators Inc.  
 14605 28th Avenue North  
 Minneapolis, MN  
 55447-4822 STANY ZJEDNOCZONE  
 Tel: +1.763.553.3300  
 Faks: +1.763.553.3387

www.medivators.eu



Dystrybutor:  
 INFORMER MED Sp. z o.o.  
 ul. Winogrody 118  
 61-626 Poznań  
 tel.: +48 61 664 38 00  
 fax: +48 61 664 38 19

www.informermed.eu