

## Mild Alkaline Cleaner

łagodny alkaliczny środek myjący

### opis produktu

Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner należy stosować do usuwania obciążeń biologicznych znajdujących się na narzędziach chirurgicznych oraz innych urządzeniach wielokrotnego użytku, w tym również mocnych zabrudzeń. Odpowiedni do użytku z aluminium i aluminium anodowanym. Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner nie powoduje korozji i jest łatwy do splukania, nie wymaga neutralizacji.

- Skuteczny i łagodny alkaliczny środek myjący
- Doskonała kompatybilność materiałowa - wolny od EDTA i NTA
- Niskopieniący się - łatwy do splukania
- Brak konieczności neutralizacji

### zastosowanie

Do użytku we wszystkich myjniach-dezynsektorach Belimed.

Uwaga: Zawsze stosować środki ochrony osobistej i postępować zgodnie z zaleceniami producenta endoskopu.

Instrukcja użycia :

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi ponownego przetwarzania wyrobów medycznych zgodnie z EN ISO 17664. Więcej informacji na temat przygotowania do obróbki przyrządu można znaleźć na stronie [www.a-k-i.org](http://www.a-k-i.org). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i postępowania należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

- Rozcieńczanie i temperatura operacyjna 2-10 ml / litr, 35-80 ° C, 5 -10 min;
- Znak CE Zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EWG, spełniający rozporządzenie europejskie (UE) 2017/745, Załącznik 1;
- Kolor przejrzysty do jasnobrazowego;
- Roztwór gotowy do użycia o pH 10-10,5 (woda DI);
- Warunki przechowywania min. 5 ° C;
- Okres przydatności do użycia 36 miesięcy;
- Instrukcje dotyczące usuwania - patrz Karta Charakterystyki;

### opakowania

- 5L
- 10L
- 25L
- 200L



dystrybutor:

**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)