

Control 5



wskaźnik do sterylizacji parowej
zgodny z ISO 11140-1 typ 5

opis produktu

Integrator Control 5 jest wskaźnikiem zaawansowanym technologicznie, który stanowi prostą i dokładną metodę badającą zajście odpowiednich warunków krytycznych w cyklu sterylizacyjnym. Wskaźnik ten może być stosowany we wszystkich procesach sterylizacji parowej (grawitacja, próżnia i cykle błyskawiczne). Control 5 integrator Typ 5 ma udokumentowaną skuteczność działania równą wskaźnikowi biologicznemu.

Wskaźnik jest skonstruowany tak, by integrować trzy krytyczne parametry procesu sterylizacji: czas, temperaturę i nasycenie parą. Informację można łatwo odczytać na polu testowym wskaźnika. Kiedy ciemny pasek osiągnie niebieską, drugą strefę bezpieczną POZYTYWNY oznacza to, że właściwe parametry sterylizacji zostały spełnione. Jeśli ciemny pasek nie osiągnie bezpiecznej niebieskiej drugiej strefy POZYTYWNY, odpowiednie warunki procesu sterylizacji nie zostały osiągnięte i narzędzia poddane procesowi sterylizacji nie powinny zostać zwolnione.

najczęstsze przyczyny niepowodzenia cyklu sterylizacji


- przeładowanie komory
- kieszenie powietrzne wewnątrz sterylizatora
- opakowanie zbyt ciasno zapakowane
- wadliwe działanie mechanizmu czasowego
- błąd w ustawieniu temperatury
- nieprawidłowa konfiguracja wsadu
- słaba jakość pary

sposób użycia i odczyt wyników

Test chemiczny należy umieścić wewnątrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji. Po sterylizacji wyjąć wskaźnik i sprawdzić przesunięcie substancji wskaźnikowej.

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe dowolnych producentów o różnej pojemności.

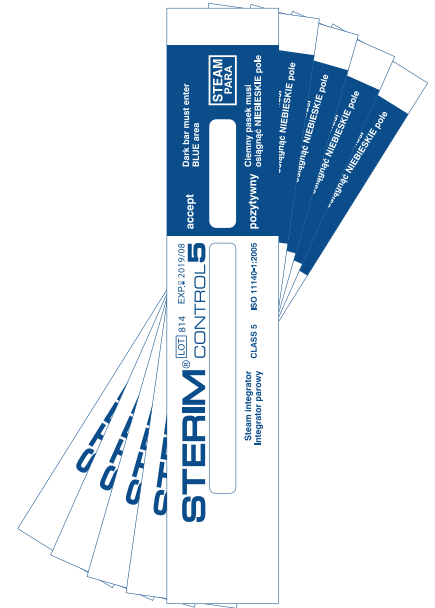

przed użyciem



po użyciu- prawidłowy wynik testu



po użyciu- nieprawidłowy wynik testu



normy

ISO 11140-1, typ 5
EN 867-1

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji

numer katalogowy i opakowanie

Control 5:
CTRL 5-100 100 szt./ opakowanie
CTRL 5-250 250 szt./ opakowanie
CTRL 5-1000 1000 szt./ opakowanie