

## Detergent nieenzymatyczny Intercept™

### PRZEZNACZENIE

Preparat myjący, przeznaczony do manualnego i automatycznego reprocesowania endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów.

### EFEKTYWNOŚĆ

Usuwa biofilm bakteryjny i zanieczyszczenia organiczne w stężeniu 0,25%. Opatentowana formuła gwarantująca szybkie wnikanie i rozpuszczanie krwi, białek, pozostałości komórek błony śluzowej, węglowodanów, tłuszczów oraz mukopolisacharydów.

### SKŁAD

Chlorek N-alkilo dimetylobenzylu amonu (C12-C18), Eter dietyleno glikolu monoetylu, Kwas L-mlekowy, Poliglikozyd alkilowany. Nie zawiera enzymów.



- **Innowacyjny i bezpieczny preparat** - niskopieniący, o neutralnym pH (7,5-8,0), biodegradowalny.
- **Sposób stosowania** – aby uzyskać optymalne wyniki czyszczenia ręcznego, środek należy mieszać z wodą o temperaturze 20-35°C i zapewnić minimalny czas oddziaływania 1 minuty. Wszystkie powierzchnie i wewnętrzne kanały należy dokładnie wypłukać wodą. W przypadku korzystania z automatycznej myjni-dezynfektora, należy przestrzegać zaleceń jej producenta.
- **Kolor / zapach:** niebieski / swoisty zapach – świeżej bawełny.
- **Walidacja preparatu:** wyrób medyczny zwalidowany do użytku w myjniach-dezynfektorach Medivators.

| ■ numer katalogowy | ■ opis                               | ■ opakowanie         |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ML02-0106          | Detergent nieenzymatyczny Intercept™ | 4 x 3,78 l w pudełku |

### Dystrybutor w Polsce: