

TECcare® CONTROL Misting System

Jednorazowy system zamgławiania

TECcare®
CONTROL



Przeznaczony do stosowania w:

SALACH:
OPERACYJNYCH,
ZABIEGOWYCH,
PACJENTÓW
ORAZ OIOM

AMBULANSACH

DOMACH POMOCY
SPOŁECZNEJ

POMIESZCZENIACH
ADMINISTRACYJNYCH,
BIUROWYCH

HOTELACH

SZKOŁACH

PRZEDSZKOLACH

ŚRODKACH
TRANSPORTU

POMIESZCZENIACH
DLA ZWIERZĄT

OBIEKTACH
SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH

ORAZ POZOSTAŁYCH
MIEJSCACH
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

Krótki opis działania

- Ekonomiczny, prosty, skuteczny i bezpieczny system dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania w czasie do **30 minut**.
- Jednorazowy zamgławiacz nie wymagający stosowania drogich, skomplikowanych dodatkowych urządzeń.
- Bezzapachowy, eliminuje drobnoustroje powodujące nieprzyjemny zapach i tworzy na powierzchni ochronę przeciwdrobnoustrojową.
- Wyjątkowa technologia dysz zapewnia skuteczne rozproszenie i dotarcie mgły dezynfekującej w trudno dostępne miejsca.
- Bezpieczny dla środowiska, sprzętu medycznego i elektronicznego, całkowicie biodegradowalny.
- Niepalny (nie zawiera butanu) propelent w aerozolu, idealny do stosowania w każdej zamkniętej przestrzeni.
- Przetestowany zgodnie z EN 1276, EN 13704, EN 14348, EN 1650, EN 14476.
- Misting System TECCARE CONTROL jest:
 - niekorozyjny, niedrażniący i nietoksyczny,
 - nie zawiera alkoholu oraz chloru,
 - bezpieczny dla żywności,
 - łatwy w użyciu, co sprawia, że jest chętnie wybierany przez klientów,
 - przedłużone działanie przeciwbakteryjne po zastosowaniu,
 - doskonała kompatybilność z innymi materiałami.
- W oficjalnych testach zgodnych z EN14476, wykonanych przez akredytowane laboratoria wykazano, że Teccare Control zabija wirusy otoczkowe, w tym SARS-CoV-2, w ciągu kilku minut od kontaktu.
- Produkt zatwierdzony przez United States Environmental Protection Agency.

Charakterystyka

Teccare® CONTROL to nowoczesny, skuteczny i bezpieczny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania, dostępny w jednorazowych pojemnikach **150 ml** i **450 ml**. Szybkie zamgławianie pomieszczeń o kubaturze **18 m³** lub **50 m³**.

Misting System wykorzystuje unikalną technologię specjalnej dyszy TECcare® CONTROL do emitowania wysokoskutecznej suchej mgły.

Umożliwia to szybkie, strefowe odkażenie, dezynfekcję i usuwanie zapachów wszystkich powierzchni w każdej zamkniętej przestrzeni. Produkt bezzapachowy, biodegradowalny, całkowicie bezpieczny dla środowiska.

Nie zawiera szkodliwego i wybuchowego butanu oraz substancji zapachowych m.in. aldehydów cynamonowych.

Szybka i skuteczna dezynfekcja minimalizuje przestoje pojazdów, pomieszczeń itp. i umożliwia ich powtórne użytkowanie w ciągu **30 minut**.

Skład chemiczny

TECcare® CONTROL Misting System wykorzystuje kombinację czwartorzędowych związków amoniowych, środków kompleksujących w roztworze wodnym.

Skład TECcare® CONTROL:
chlorek didecyldimetyloamoniowy <0,10%,
chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%,
pozostałe składniki wodne 99,84%

Skuteczność mikrobiologiczna

Jednorazowy system zamgławiania TECcare® CONTROL jest bakterioobójczy w 99,999%, zarodnikobójczy, prątkobójczy, sporobójczy C.difficile, grzybobójczy i wirusobójczy zarówno dla wirusów otoczkowych oraz bezotoczkowych, m. in. Corona, Hepatitis, HIV, Ebola, Grypa. Skuteczny przeciwko pleśnionom oraz drożdżom. Zgodny z normą OSHA dot. patogenów przenoszonych przez krew.

Wydłużona ochrona przeciwdrobnoustrojowa.

Testowane zgodnie z EN 1276, EN 13704, EN 1650, EN 14348, EN 14476. Protokoły testowe AOAC. Wyrób medyczny zgłoszony do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych w Polsce. CE

autoryzowany dystrybutor:



Powered by
TECcare®
Technologies

TECcare® CONTROL Misting System

Jednorazowy system zamgławiania

Klasa mikrobiologiczna	Stężenie (ppm)	Czas kontaktu (min)
Bakterie: <i>MRSA; E.coli; Salmonella; Campylobacter</i>	660	1
Spory: <i>Clostridium difficile</i>	660	60
Wirusy: <i>Influenza; HIV; Norovirus; Adenovirus</i>	660	5
Grzyby (pleśń i drożdże): <i>Candida; Aspergillus niger</i>	660	1
Prątki: <i>Tuberculosis</i>	1320	1

Miejsce zastosowania

Każda zamknięta przestrzeń.

Sposób użycia

System jednorazowego użytku TECcare® CONTROL to gotowy do użycia, jednorazowy produkt przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni w zamkniętym pomieszczeniu.

W pomieszczeniu poddawany zamgławianiu nie mogą przebywać ludzie, a wszelkie urządzenia elektryczne muszą być wyłączone. System zamgławiania powinien być umieszczony w uchwycie, następnie należy wcisnąć przycisk dyszy i opuścić pomieszczenie. Wypełnienie środkiem dezynfekcyjnym potrwa kilka minut. Po zakończonej dyfuzji, należy odczekać 10-15 minut, aby mgła osiadła na wszystkich powierzchniach i przy odpowiednim stężeniu ppm nastąpiło działanie biobójcze na powierzchniach. Następnie pomieszczenie należy przewietrzyć przez kilka minut przed powtórny użyciem. Całkowity czas procedury wynosi do 30 minut.

Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do pracy z produktem należy przeczytać Kartę Charakterystyki oraz instrukcję obsługi.

Należy unikać bezpośredniego wdychania.

Używać tylko zgodnie z zaleceniami.

Pojemnik ciśnieniowy. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Nie przekłuwaj, nie pal nawet po zużyciu. Nie rozpylaj na otwarty ogień lub żarzący się materiał. Przechowuj z dala od źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie lub wkrótce po użyciu.

Referencje niezależnych klientów

Wszystkie referencje klientów są dostępne na życzenie.

Zachowania środowiskowe

Łatwo ulega całkowitej biodegradacji.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spełniają kryteria biodegradowalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Dowody tego stwierdzenia pozostają do dyspozycji organów państw członkowskich zajmujących się komponentami i będą udostępniane na ich bezpośredni wniosek przez producenta detergentu.

Opakowanie jest wykonane z aluminium i może być wykorzystywane zarówno materiałowo, jak i termicznie.

Właściwości fizyczne

Stan: ciecz

Kolor: bezbarwny

Wartość pH: 7 ± 0.5

Rozpuszczalność: w pełni rozpuszczalny

Utlenianie: nie utlenia się (wg. kryteriów WE)

Okres trwałości

Aerozol: 2 lata

Wielkość opakowania

150ml; 450ml

Przechowywanie

W chłodnym miejscu.

W temperaturze wyższej niż 5°C.

Akcesoria

Tekturowy stojak



Talley Environmental Care Limited
Hannah Way, Gordleton Industrial Park,
Lymington, Hampshire, SO41 8JD, UK.



TECcare® is a
Registered Trade Mark
of Talley Environmental
Care Limited.



autoryzowany dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu