

## Belimed Protect TM Neutral Enzyme Cleaner

### enzymatyczny środek czyszczący

#### opis produktu

Do usuwania krwi, białek i tłuszczu

Specjalnie opracowany preparat w celu usunięcia trudnych do oczyszczenia złożeń znajdujących się na narzędziach chirurgicznych, elastycznych endoskopach i związanych z nimi akcesoriach wielokrotnego użytku. Ten niskopięniący środek czyszczący łączy siły hydrolizy enzymatycznej w celu zahamowania osadzania się proteaz na zabrudzonych powierzchniach instrumentów, podczas gdy jego układ środka powierzchniowo czynnego fizycznie usuwa i zatrzymuje osady.

#### etapy dekontaminacji endoskopów elastycznych

- Wstępne czyszczenie natychmiast po badaniu
- Czyszczenie manualne
- Reprocesowanie w automatycznym urządzeniu do dekontaminacji endoskopów
- Przechowywanie w szafie do endoskopów

#### zastosowanie

Do użytku we wszystkich myjniach-dezynfektorach Belimed.

Uwaga : Zawsze stosować środki ochrony osobistej i postępować zgodnie z zaleceniami producenta endoskopu.

Instrukcja użycia :

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi ponownego przetwarzania wyrobów medycznych zgodnie z EN ISO 17664. Więcej informacji na temat przygotowania do obróbki przyrządu można znaleźć na stronie [www.a-k-i.org](http://www.a-k-i.org). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i postępowania należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

- Rozcieńczanie i temperatura robocza 1-5 ml / l, 40-60 ° C
- Znak CE Zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42 / EEC, spełniający rozporządzenie europejskie (UE) 2017/745, Załącznik 1
- Kolor przejrzysty do jasnożółtego
- Uwaga: w zależności od temperatury przechowywania, światła i wieku produktu koncentrat może ulegać zmianom koloru, jednak w przypadku ich przechowywania nie wpływają one na skuteczność produktu.
- Roztwór gotowy do użycia o pH 7-8 (woda DI)
- Warunki przechowywania 5-25 ° C
- Okres przydatności do użycia 24 miesiące
- Instrukcje dotyczące usuwania- patrz Karta Charakterystyki

#### opakowania

- 5 l
- 10 l
- 25 l
- 200 l



dystrybutor:

**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)