


## BOWIE DICK SENSITIVE

pakiet testowy

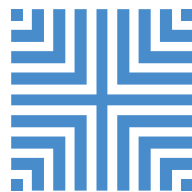

### opis produktu

Pakiet testowy Bowie Dick Sensitive przeznaczony jest do autoklawów wyposażonych w system próżniowy. Ma na celu wskazanie skuteczności usunięcia z komory sterylizatora gazów nieskondensowanych (NCG), przetestowanie szczelności, jak również zdolności penetracji parą poszczególnych wsadów. Zastosowany dodatkowy arkusz wczesnego ostrzegania wykrywa już pierwsze objawy nieprawidłowości pracy sterylizatora, polegające na pozostawieniu nawet niewielkiej ilości powietrza w komorze. Pakiet testowy Bowie Dick Sensitive marki STERIM wykonany jest w ten sposób, że karta testowa oraz arkusz wczesnego ostrzegania umieszczone są pomiędzy arkuszami specjalnego papieru oraz pianki, które tworzą szczególnie krytyczne warunki sterylizacji. Test powinien być wykonywany codziennie, przed rozpoczęciem rutynowej pracy sterylizatora. Cykl przeprowadza się w pustej komorze w celu jej przygotowania do pracy i wychwycenia jakichkolwiek gazów nieskondensowanych (NCG), które mogą znajdować się w przewodach instalacji urządzenia.

Wynik testu jest natychmiastowy i łatwy w interpretacji dzięki wyraźnej zmianie koloru. Substancje chemiczne zawarte w pakiecie są pozbawione ołowiu i całkowicie bezpieczne dla środowiska.

Informacje na teście umieszczone są w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wilgocią pojedynczy pakiet umieszczony jest w woreczku foliowym zamykanym strunowo.



### sposób użycia i odczyt wyników

Pakiet testowy należy umieścić w wygrzanej, pustej komorze sterylizatora i przeprowadzić cykl sterylizacji trwający 3,5-4 min w temp. 134°C.

Po zakończonym procesie sterylizacji należy wyjąć pakiet ze sterylizatora, po uzyskaniu przez pakiet temperatury pokojowej pozwalającej na jego bezpieczne otwarcie, należy odczytać wynik testu. Wskaźnik na etykiecie zewnętrznej, karta testowa oraz arkusz wczesnego ostrzegania po prawidłowo przeprowadzonym procesie, powinien zmienić kolor z niebieskiego na czarny.

### obszary zastosowań

Steryliзаторы паровые различных типов с программой Bowie-Dick

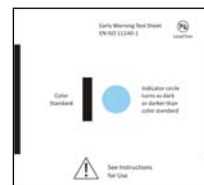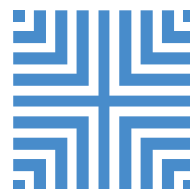

### normy

ISO 11140 - 1 Typ 2  
EN 867-1  
EN 867-4  
AAMI ST 60 Typ 2

### przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 10°-40°C.  
  
Okres przydatności umieszczony na etykiecie produktu

### numer katalogowy i opakowanie

**Pakiet testowy BOWIE DICK Sensitive: BDSTS**  
20 szt. w opakowaniu  
100 szt. w opakowaniu