

Ahlstrom Munksjö

System bariery sterylnej 99,9%

papier krepowany 60g/m²

opis produktu

Jednorazowe opakowanie ze specjalnej krepki o gramaturze 60g/m² pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Surowce użyte do produkcji (pulpa celulozy) są w 100% naturalne, nie zawierają ołowiu, lateksu oraz substancji niebezpiecznych, a ich doskonała przepuszczalność jest połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną na poziomie 99,9% przy podwójnym pakowaniu. Produkt dedykowany jest do pakowania małych zestawów. Papier oferowany w kolorze białym, niebieskim i zielonym.

sposób użycia


Należy zapakować wybrany zestaw narzędziowy, bielizniany lub inny, w dwie warstwy papieru o różnych kolorach, zgodnie z przyjętymi zasadami zawijania. Gotowy pakiet zaleca się zabezpieczyć dodatkowo taśmą samoklejącą. Następnie należy przeprowadzić proces sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta.

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe (STEAM) i gazowe (EO) różnego typu.

wytwórca

Ahlstrom-Munksjö Nonwovens LLC
Windsor Locks, CT - Stany Zjednoczone

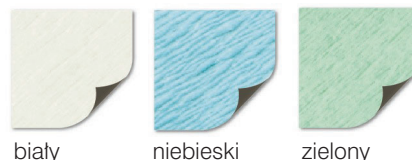

biały

niebieski

zielony

normy

ISO 11607-1:2006,
EN 868
Dyrektywa CE 93/42

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.

Na produkcie umieszczony numer serii odpowiadający numerowi na opakowaniu zbiorczym i dacie produkcji.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu

Ahlstrom Munksjö

System bariery sterylnej

papier krepowany 60g/m² - rozmiary

biały papier krepowany

| | | | | | |
|--------|------------|------------------------|--------|--------------|-----------------------|
| M3030B | 30 x 30 cm | 2000 szt. w opakowaniu | M9012B | 90 x 120 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M4040B | 40 x 40 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1010B | 100 x 100 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M5050B | 50 x 50 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1212B | 120 x 120 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M6060B | 60 x 60 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1214B | 120 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M7575B | 75 x 75 cm | 250 szt. w opakowaniu | M1014B | 100 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M8080B | 80 x 80 cm | 250 szt. w opakowaniu | M1315B | 130 x 150 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M9090B | 90 x 90 cm | 250 szt. w opakowaniu | | | |

zielony papier krepowany

| | | | | | |
|--------|------------|------------------------|--------|--------------|-----------------------|
| M3030Z | 30 x 30 cm | 2000 szt. w opakowaniu | M9012Z | 90 x 120 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M4040Z | 40 x 40 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1010Z | 100 x 100 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M5050Z | 50 x 50 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1212Z | 120 x 120 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M6060Z | 60 x 60 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1214Z | 120 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M7575Z | 75 x 75 cm | 250 szt. w opakowaniu | M1014Z | 100 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M8080Z | 80 x 80 cm | 250 szt. w opakowaniu | M1315Z | 130 x 150 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M9090Z | 90 x 90 cm | 250 szt. w opakowaniu | | | |

niebieski papier krepowany

| | | | | | |
|--------|------------|------------------------|--------|--------------|-----------------------|
| M3030N | 30 x 30 cm | 2000 szt. w opakowaniu | M9090N | 90 x 90 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M4040N | 40 x 40 cm | 500 szt. w opakowaniu | M9012N | 90 x 120 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M5050N | 50 x 50 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1010N | 100 x 100 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M6060N | 60 x 60 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1212N | 120 x 120 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M7575N | 75 x 75 cm | 250 szt. w opakowaniu | M1214N | 120 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M8080N | 80 x 80 cm | 250 szt. w opakowaniu | M1014N | 100 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |

biały i zielony papier krepowany, naprzemiennie pakowany

| | | | | | |
|---------|------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------|
| M3030BZ | 30 x 30 cm | 2000 szt. w opakowaniu | M9012BZ | 90 x 120 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M4040BZ | 40 x 40 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1010BZ | 100 x 100 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M5050BZ | 50 x 50 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1212BZ | 120 x 120 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M6060BZ | 60 x 60 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1214BZ | 120 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M7575BZ | 75 x 75 cm | 250 szt. w opakowaniu | M1014BZ | 100 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M9090BZ | 90 x 90 cm | 250 szt. w opakowaniu | | | |

niebieski i zielony papier krepowany, naprzemiennie pakowany

| | | | | | |
|---------|------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------|
| M3030NZ | 30 x 30 cm | 2000 szt. w opakowaniu | M9012NZ | 90 x 120 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M4040NZ | 40 x 40 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1010NZ | 100 x 100 cm | 250 szt. w opakowaniu |
| M5050NZ | 50 x 50 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1212NZ | 120 x 120 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M6060NZ | 60 x 60 cm | 500 szt. w opakowaniu | M1214NZ | 120 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M7575NZ | 75 x 75 cm | 250 szt. w opakowaniu | M1014NZ | 100 x 140 cm | 100 szt. w opakowaniu |
| M9090NZ | 90 x 90 cm | 250 szt. w opakowaniu | | | |

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu


www.informermed.eu

Ahlstrom Munksjö


System bariery sterylnej

papier krepowany 60g/m² - instrukcja

■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 1:

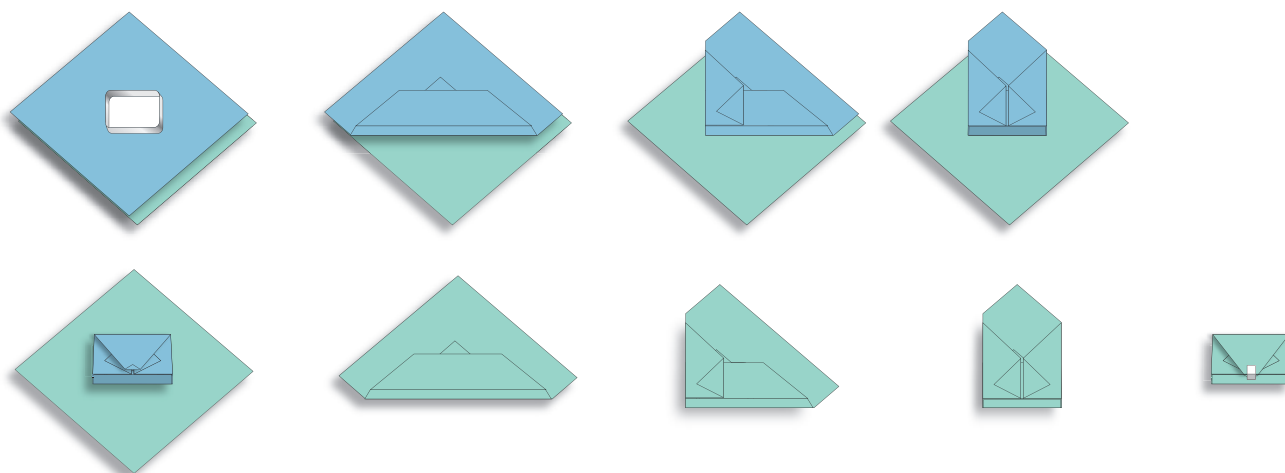

■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 2:

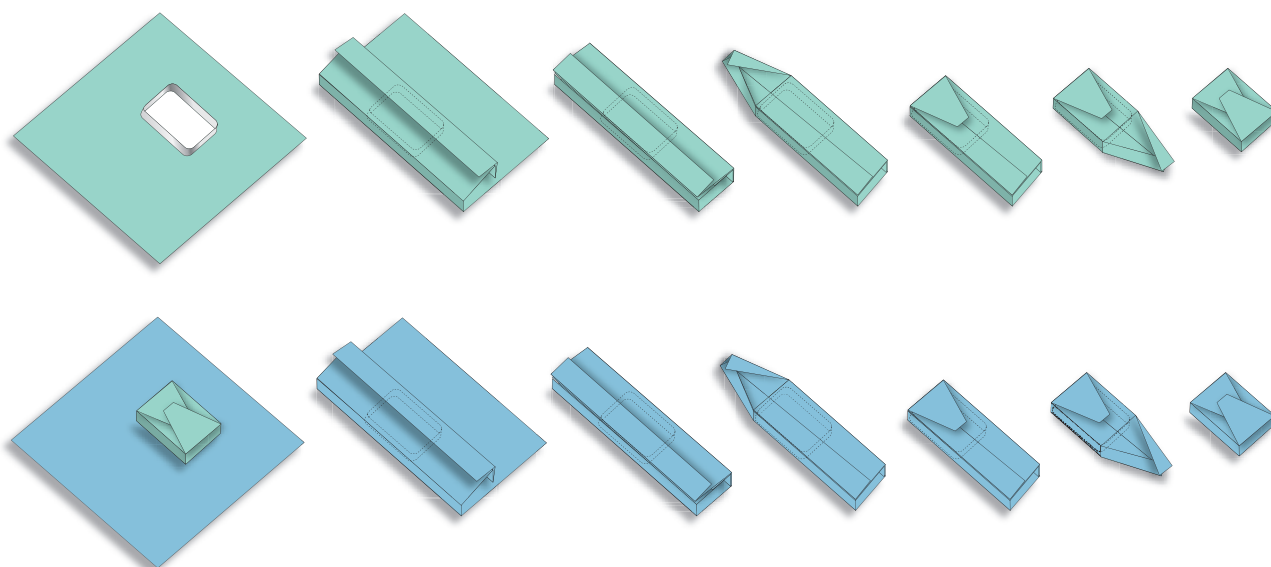

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu