

WASH CONTROL

test kontroli mycia maszynowego

opis produktu

Nowoczesne testy służące do rutynowej kontroli procesów mycia maszynowego w automatycznych myjniach-dezynfektorach różnego typu. Testy Wash Control są nieodzownym elementem w procesie codziennej, rutynowej kontroli procesów mycia zgodnie z normą EN ISO 15883-1:2010.

Substancja wskaźnikowa, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symuluje pozostałości zaschniętej krwi i została umieszczona na plastikowym nośniku w formie czterech wyraźnych kwadratów. Sposób umieszczenia substancji wskaźnikowej pozwala na kontrolę mycia w czterech krytycznych płaszczyznach jednocześnie.

Test należy używać zawsze ze specjalnym uchwytem ze stali kwasoodpornej, który ma za zadanie dodatkowo utrudnić dostęp czynnika myjącego. Niski koszt monitorowania procesów mycia pozwala na częste używanie testów; zaleca się ich stosowanie co najmniej raz dziennie z pustym wsadem oraz cyklicznie w ciągu dnia z pełnym wsadem. Zaleca się przeprowadzić kontrolę mycia każdorazowo po serwisowaniu urządzenia myjącego.

Na teście umieszczono informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu i numerze LOT.

Testy znajdują się w opakowaniu strunowym, które nie przepuszcza światła i ułatwia przechowywanie zapewniając wielokrotne otwieranie oraz zamykanie.

sposób użycia i odczyt wyników

Umieścić test w specjalnym uchwycie równomiernie na całej powierzchni przyrządu. Następnie uchwyt ze wskaźnikiem umieścić wewnątrz myjni, np. na tacy narzędziowej, w miejscu uznawanym za najbardziej krytyczne dla danego modelu urządzenia myjącego. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie mycia substancja testowa koloru czerwonego powinna zostać całkowicie usunięta. Pozostałości substancji testowej po procesie oznaczają nieskuteczne mycie. Zalecane jest zachowanie wyniku testu w celach archiwizacji procesu mycia.

obszary zastosowań

Myjnie-dezynfektory automatyczne oraz ultradźwiękowe o różnej wielkości załadunku.

przed myciem:




po nieefektywnym myciu:



po skutecznym myciu:



uchwyt do testu WASH CONTROL

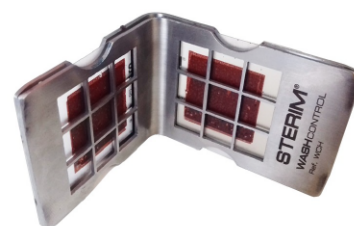

normy

EN ISO 15883-1:2010

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu.
Okres przydatności:
2 lata od daty produkcji.
Data produkcji na opakowaniu.

numer katalogowy

WCS100- 100szt./ op.
WCS1- 1szt./ ramka