

System natrysku środków dezynfekcyjnych dla narzędzi litych i kanałowych

opis produktu

Nowoczesny system natrysku środków dezynfekcyjnych w formie piany pozwala w prosty i szybki sposób pokryć powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne brudnych narzędzi. System w pełni zastępuje ręczne dozowniki, pozwala na użycie dowolnych środków chemicznych do mycia wstępnego zapewniając odpowiednią wilgotność brudnego instrumentarium. Automatyczny układ dozowania środka chemicznego tworzy w kilka sekund pianę pokrywającą całą tacę narzędziową.

Urządzenie wyposażone jest w dwa aplikatory piany:

- natrysk powierzchniowy dla narzędzi litych, przy pomocy kilku dysz
- dozowanie wewnętrzne do użycia w kanałach narzędziowych o różnych średnicach

System natrysku piany wyposażony w pompę perystaltyczną gwarantuje precyzyjne odmierzanie ilości dozowanego detergentu. Dzięki zastosowaniu elektronicznych mikrosterowników urządzenie wytwarza pianę w dokładnie określonej ilości oraz stężeniu, a zabezpieczone hasłem ustawienia uniemożliwiają ingerencję nieuprawnionych użytkowników. System posiada opatentowaną funkcję 100% cyfrowej kontroli ilości koncentratu i struktury piany (mokra/ sucha).

zalety urządzenia

- eliminacja konieczności stosowania uciążliwego i długotrwałego dozowania ręcznego
- możliwość dozowania środków chemicznych bezpośrednio do kanału narzędziowego dzięki zastosowaniu specjalnego aplikatora dokanałowego
- znaczne skrócenie czasu fazy mycia wstępnego
- możliwość regulacji jakości piany (piana sucha lub mokra)
- aplikacja piany powierzchniowa i dokanałowa
- trwałe, lekkie aplikatory piany, wyposażone w ergonomiczną rękkość
- urządzenie mobilne przy wykorzystaniu dedykowanego stojaka jezdnego/ możliwość montażu ściennego

specyfikacja produktu

wymiary (WxSxG): 28 x 24 x 18 cm
wykonanie obudowy: stal nierdzewna 304
prędkość przepływu pompy dozującej: 10-250 ml/ min.
zasilanie: 230V, 50Hz, 0,7A
waga urządzenia: 6,4 kg
długość aplikatorów: 33 cm
kod produktu: 72620-EU

