

Wash-Checks™ H&E

kontrola mycia narzędzi kanałowych

opis produktu

Innowacyjne testy służą do sprawdzania skuteczności procesów mycia instrumentów kanałowych, endoskopów oraz efektywności działania detergentów w myjniach-dezynfektorach każdego typu.

Testy Wash-Checks™ H&E są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia zgodnie z ISO 15883.

Testy są bezpieczne dla użytkownika i nie zawierają komponentów krwi, a substancja wskaźnikowa na teście została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie naśladować pozostałości zaschniętej krwi oraz tkanek.

Test należy używać zawsze ze specjalnym uchwytem, który ma za zadanie dodatkowo utrudnić dostęp czynnika myjącego. Wskaźnik kontrolny umieszczony jest na specjalnej, cienkiej płytce metalowej, która doskonale nadaje się do archiwizacji. Niski koszt monitorowania procesów mycia pozawala na częste używanie testów; zaleca się ich stosowanie dwa razy dziennie z pełnym wsadem oraz cyklicznie 1 raz w tygodniu z pustym wsadem. Odczyt wyniku kontroli mycia w czterech płaszczyznach. Testy należy używać zawsze ze specjalnymi próbnikami H lub E symulującymi kanały instrumentów medycznych.

Holder E to próbnik ze stali szlachetnej połączony z rurką silikonową o długości 1 metra, zakończony wymienną złączką typu luer-lock. Holder H to próbnik i rurka o długości 30 cm ze stali szlachetnej zakończony wymienną złączką typu luer-lock.

sposób użycia i odczyt wyników

Należy umieścić test kontroli mycia Wash-Checks™ H w otworze uchwyty. Następnie podłączyć urządzenie do portów myjni i zacząć proces mycia instrumentów kanałowych. Po zakończeniu procesu mycia należy wyjąć test i sprawdzić efektywność procesu mycia. Jeśli myjnia działa w sposób właściwy, to substancja wskaźnikowa zostanie usunięta podczas procesu mycia. Pozostałość czerwonego zabrudzenia na teście może oznaczać, iż myjnia działa niewłaściwie.

obszary zastosowań

Myjnie maszynowe wszystkich typów.



Przed myciem



Po nieefektywnym myciu



Po efektywnym myciu



Uchwyt E

Uchwyt H

normy

ISO 9001:2008,
ISO 13485:2003,
ISO 15 883

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres przydatności:
3 lata od daty produkcji.

numer katalogowy i opakowanie

Test - WC105:
100 szt. w opakowaniu
Uchwyt H - WC106:
1 szt.
Uchwyt E - WC107:
1 szt.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu