

TOSI® FlexiCheck

Kontrola mycia

test kontroli mycia endoskopów elastycznych

opis produktu

Wskaźnik TOSI FlexiCheck służy do monitorowania skuteczności mycia w urządzeniach myjąco- dezynfekujących z podłączeniem jednokanałowym dla endoskopów elastycznych. Jest to wskaźnik łączący dwa różne zabrudzenia testowe na jednej metalowej płytce. System składający się z dwóch komponentów pozwala na jednoczesną kontrolę skuteczności usuwania krwi i polisacharydów. Próbnik ze stali szlachetnej z jednowęzłowym przewodem silikonowym symuluje kanał endoskopu elastycznego

sposób użycia i odczyt wyników

Bezpośrednio przed użyciem należy wyjąć test z opakowania ochronnego zwracając uwagę, aby nie dotykać zabrudzeń testowych. Odkręcić próbnik FlexiCheck i umieścić wewnątrz płytkę testową. Podłączyć próbnik do jednego z kanałów automatu myjącego. Następnie poddać test procesowi mycia razem z endoskopami elastycznymi. Po zakończonym procesie należy wyjąć test z próbnika i dokonać oceny wzrokowej. Optymalny wynik to brak widocznych zabrudzeń na płytce kontrolnej. Pozostawione jakiegokolwiek pozostałości na teście wskazują na niewystarczającą skuteczność procesu mycia.

obszary zastosowań

MMyjnie maszynowe podłączeniem jednokanałowym dla endoskopów elastycznych.



normy

EN ISO 15883

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w temperaturze 2-25°C, w zamkniętej folii ochronnej, z dala od środków dezynfekujących.

numer katalogowy i opakowanie

TOSI FlexiCheck:
test: 8298
25 szt. w opakowaniu
próbnik ze stali szlachetnej: 8299
1 szt. w opakowaniu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu