

# Wash-Checks™

testy kontroli mycia maszynowego

## opis produktu

Innowacyjne testy służą do sprawdzania skuteczności procesów mycia oraz efektywności działania detergentów w myjniach-dezynfektorach każdego typu. Testy Wash-Checks™ są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia zgodnie z ISO 15883.

Testy są bezpieczne dla użytkownika i nie zawierają komponentów krwi, a substancja wskaźnikowa na teście została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie naśladować pozostałości zaschniętej krwi oraz tkanek. Test należy używać zawsze ze specjalnym uchwytem, który ma za zadanie dodatkowo utrudnić dostęp czynnika myjącego. Wskaźnik kontrolny umieszczony jest na specjalnej, cienkiej płytce metalowej, która doskonale nadaje się do archiwizacji. Niski koszt monitorowania procesów mycia pozwala na częste używanie testów; zaleca się ich stosowanie co najmniej raz dziennie z pustym wsadem oraz cyklicznie, w ciągu dnia, z pełnym wsadem. Odczyt wyniku kontroli mycia w czterech płaszczyznach.

Wszystkie wskaźniki posiadają indywidualny numer seryjny.

## sposób użycia i odczyt wyników

Jeśli myjnia działa w sposób właściwy, to substancja wskaźnikowa zostanie usunięta podczas procesu mycia. Pozostałość czerwonego zabrudzenia na teście może oznaczać, iż myjnia działa niewłaściwie.

## obszary zastosowań

Myjnie maszynowe wszystkich typów.



Przed myciem



Po nieefektywnym myciu



Po efektywnym myciu



Uchwyt

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 15 883	Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji.	<b>Test - WC101:</b> 100 szt. w opakowaniu <b>Test - WC101/50:</b> 50 szt. w opakowaniu <b>Uchwyt H - WC102:</b> 1 szt.