

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

dla sterylizowanych materiałów medycznych

opis produktu


System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5. Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA® wraz z nową, odklejalną folią tworzą cztery razy bardziej odporne na perforację, bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych. Polyolefin i folia połączone są 3-kanalowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m², zastosowany w opakowaniach ULTRA® zamiast papieru, gwarantują wyjątkową łatwość otwierania przez odklejenie, całkowicie eliminując ryzyko pylenia. Opakowania można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Dodatkowo ich wysoka porowatość pozwala na dobrą penetrację środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia. Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ 1. Kontrolę skuteczności procesu sterylizacji innymi metodami zaleca się wykonywać poprzez umieszczenie wskaźnika chemicznego wewnątrz opakowania. Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 130-150°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia. Nowe opakowania ULTRA® posiadają certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną przez okres min. 12 m-cy.

przeznaczenie opakowań ULTRA®

- tace narzędziowe
- kosze na implanty
- narzędzia okulistyczne
- duże i ciężkie zestawy
- narzędzia delikatne i złożone

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowe (plazma, tlenek etylenu, formaldehyd) różnych rozmiarów i typów spełniających odpowiednie normy.

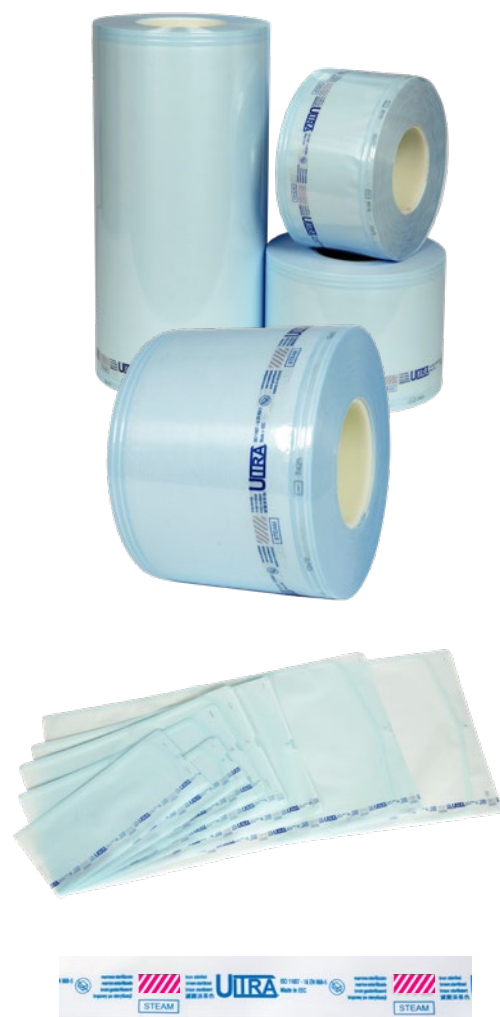

normy

ISO 11607-1
PN EN 868 -5
ISO 9001
Dyrektywa CE 93/42
Klasa 1 wyrób medyczny niesterylny,
CE

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu,
w oryginalnym opakowaniu,
zdala od źródeł światła,
w temperaturze 10-40°C.
Okres przydatności: na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii
umieszczone na opakowaniu zbiorczym.

Numer serii umieszczony na rękawie.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

dla sterylizowanych materiałów medycznych

■ rękawy ULTRA®

99ULT05070	50mm x 70 m
99ULT08070	80mm x 70 m
99ULT12070	120mm x 70 m
99ULT16070	160mm x 70 m
99ULT22070	220mm x 70 m
99ULT25070	250mm x 70 m
99ULT28570	285mm x 70 m
99ULT32070	320mm x 70 m
99ULT38070	380mm x 70 m
99ULT42070	420mm x 70 m
99ULT47070	470mm x 70 m
99ULT52070	520mm x 70 m
99ULT58070	580mm x 70 m

■ torebki ULTRA®

98ULT08030	80 x 300 mm
98ULT01220	120 x 200 mm
98ULT01240	120 x 400 mm
98ULT01630	160 x 300 mm
98ULT01650	160 x 500 mm
98ULT02240	220 x 400 mm
98ULT02260	220 x 600 mm
98ULT02550	250 x 550 mm
98ULT02845	285 x 450 mm
98ULT02860	285 x 600 mm
98ULT03255	320 x 550 mm
98ULT03845	380 x 450 mm
98ULT03865	380 x 650 mm
98ULT03869	380 x 690 mm



Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w myśl prawa handlowego.
 Producent zastrzega sobie możliwość zmian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.